



Dátum spotreby:

Číslo šarže:

Číslo verzie návodu na použitie: 4.1 SK

**Dátum vydania poslednej revízie
návodu na použitie:** 15. 1. 2019



8 588007 405070 >



Aqvitox
TECHNOLOGY

NÁVOD NA POUŽITIE Aqvitox® - D roztok (5 l, bandaska)

Názov zdravotnickej pomôcky:
Aqvitox® - D roztok

Výrobca: Aqvitox Technology
s.r.o., so sídlom Šoltésovej
14, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika

**Trieda rizika zdravotnickej
pomôcky:** III

Určený účel použitia:
Aqvitox® - D roztok je
elektrolyzovaný čistiaci roztok
určený na podporu hojenia rán
a poranení. Mechanizmus účinku
spočíva v obklade a mechanickom
vyčistení rany a vo vytvorení
vlhkého prostredia, ktoré je ďalej
podporené znížením mikrobiálnej
záťaže v rane. Prípravok svojim
zložením neobsahuje živé
organizmy, je určený pre slabo až
stredne poškodenú kožu a nie je
primárne určený na výplach.

Postup pri aplikácii: Ošetrovanie
rán sa vykonáva opakovaným
oplachom alebo obkladom
roztokom Aqvitox® - D. Oplach
sa vykonáva podľa potreby
niekoľkokrát denne potrením
postihnutého miesta navlhčeným
tampónom alebo priložením gázy
navlhčenej v roztoku Aqvitox® - D,
prípadne vlhkou terapiou.

Nežiaduce účinky: Aqvitox® - D
roztok je netoxický. Pri jeho
používaní neboli zistené žiadne
nežiaduce účinky, u ktorých
by bola preukázaná spojitosť
s aplikáciou výrobku. Pri kontakte
s pokožkou nie je výrobok
dráždivý. Pri zasiahnutí očí tiež
nie je dráždivý, avšak u citlivých
osôb je potrebný oplach
tečúcou vodou. V prípade poškodenia

menšieho množstva ako 1 dl
nie sú potrebné žiadne zvláštna
opatrenia. U väčšieho množstva
je treba vypláchnuť ústa pitnou
vodou, vypiť aspoň 0,5 l vody
a privolať lekára.

Zloženie: Elektrolyzovaná
voda, v nízkych koncentráciách
kyselina chlórna, chlórnan sodný,
chlórdioxid, chlorid sodný

**Zvláštne podmienky pre
skladovanie:** Aqvitox® - D roztok
skladujte v dobre uzatvorených
obaloch, v suchom a vetranom
prostredí, pri teplote 5 až 30 °C.
Výrobok nevystavujte priamemu
slnčnému žiareniu a uchovávajte
mimo dosah detí. Stabilita je
zaistená do dátumu spotreby.

Dôležité upozornenia: Výrobok
nebol testovaný na deťoch a na
tehotných a kojacich ženách,
preto je jeho použitie na tejto
skupine pacientov možné iba po
konzultácii s lekárom. Výrobok
je kvapalný s možným slabým
chlórnyim zápachom. Riziko
vyblednutia odevov. Výrobok je
možné zlikvidovať nariadením
vodou a spláchnutím do odpadu.
Výrobok by sa nemal dostať
do styku s kyselinami. Obal je
možné po vypláchnutí recyklovať.
Na predídienie vzniku alergickej
reakcie nepoužívajte produkt
v prípade precitlivenosti na
niektorú z obsiahnutých zložiek.
V prípade zistenia nežiadúcich
účinkov je nutná konzultácia
s lekárom. U výrobku nebola
testovaná biokompatibilita
pre dlhodobé použitie (t. j. nad
30 dní).

