

L-Mesitran Hydro & Border

Opis výrobku

L-Mesitran Hydro je hydroaktívne nízkoprilnavé krytie obsahujúce med, ktoré sa používa na akútne a chronické rany. L-Mesitran Border je identický, ale s adhezívnym okrajom. L-Mesitran Hydro a Border sú sterilné polopriepustné krytia na rany obsahujúce 30 % medu, akrylový polymérový gél a vodu s polyuretánovým podkladovým filmom, bez prilnavého okraja a s prilnavým okrajom. Hydrogélková vložka obsahujúca med dodáva vlhkosť na opätovnú hydratáciu suchého tkaniva a je tiež schopná absorbovať malé množstvo exsudátu na zachovanie vlhkého prostredia podporujúceho hojenie. Podkladový film poskytuje krytiu vlastnosti antibakteriálnej bariéry. Prilnavý okraj výrobku L-Mesitran Border umožňuje pevné zafixovanie krytia. To je prospešné, ak sa pacienti s krytím potrebujú osprchovať alebo okúpať.

Indikácie

Výrobky L-Mesitran Hydro a Border sú indikované na chronické rany, ako sú: preležaniny, povrchové a čiastočne zhrubnuté popáleniny, bercové, arteriálne a diabetické vredy a rozširujúce sa rany. Sú indikované aj na akútne rany, ako sú miesta transplantácie, chirurgické rany, rezné rany a odreniny.

Kontraindikácie

Nepoužívajte u jedincov so známou citlivosťou na krytie alebo jeho zložky. Krytie sa nemá používať na:

- Silno mokvajúce rany,
- Úplne zhrubnuté popáleniny,
- Hlboké, úzke dutiny alebo sínusy.

Upozornenia a opatrenia

Krytie sa môže použiť na kontaminované a kolonizované rany. Ak sú však rany klinicky infikované, výrobok prestaňte používať a vyhľadajte príslušnú lekársku pomoc. Akákoľvek ďalšia liečba infekcie sa má začať podľa miestneho protokolu a pod lekárske vedením. L-Mesitran Hydro neobsahuje prilnavý okraj, a preto nie je nepremokavý. Ako nepremokavé krytie sa môže použiť L-Mesitran Border. Vlastnosť antibakteriálnej bariéry krytia sa naruší, ak je krytie prepichnuté, úplne neprilne na kožu alebo spod okrajov vyteká exsudát. Pri odstraňovaní krytia je potrebná opatrnosť, aby sa predišlo poškodeniu kože lepidlom, najmä pri opakovaných aplikáciách. Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo nejakým spôsobom porušené.

Návod na použitie

1. Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite ranu podľa protokolu.
2. Zvoľte vhodnú veľkosť krytia, ktorá zabezpečí, že gélová vložka prekryje okraje rany o približne 1cm.
3. Vyberte sterilné krytie z obalu.
4. Najprv odlúpnite polovicu plastového ochranného podkladu.
5. Jemne priložte stranu s odhaleným gélom na ranu a súčasne odlúpnite druhú polovicu plastového ochranného podkladu.
6. Keď je krytie na danom mieste, odstráňte papierové podklady z vrchnej časti krytia. Zabezpečte, aby sa lepidlo výrobku L-Mesitran Border nedostalo do kontaktu s povrchom rany a aby náležite prilnulo.
7. Zabezpečte pripevnenie výrobku L-Mesitran Hydro vhodným fixačným materiálom.
8. Ranu a okolité tkanivá pravidelne kontrolujte podľa miestneho protokolu.
9. V prípade neznášanlivosti krytia alebo jednej z jeho zložiek odstráňte krytie vhodnými technikami a oblasť starostlivo očistite.

Frekvencia výmen

Krytie môže ostať na mieste až päť dní, v závislosti od množstva exsudátu vytekajúceho z rany. Vymeňte krytie predtým, ako nasiakne exsudátom alebo sa poškodí: prepichnutím, čiastočným odstránením alebo vytekaním exsudátu. Úplné a jemné odstránenie krytia možno podporiť navlhčením. Každé krytie je určené len na jedno použitie. Nepoužívajte po dátume expirácie. Uchovávajte pri teplote medzi 5 °C a 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou.