

L-Mesitran Soft

Opis výrobku

L-Mesitran Soft obsahuje: 40 % lekárske med, lekárske hypoalergénny lanolín (Medilan®), propylénglykol, PEG 4000 a vitamíny C a E.

Keď je gél v kontakte s ranou, z okolitých tkanív sa odvádza tekutina, čo vytvára vlhké prostredie podporujúce hojenie rany. To stimuluje proces hojenia rany tým, že uľahčuje autolýzu nekrotického a iného devitalizovaného materiálu, pomáha pri príprave spodiny rany a podporuje epiteizáciu.

L-Mesitran:

- má antibakteriálne vlastnosti.
- Postupne sa stráca a dá sa ľahko odstrániť podľa miestneho protokolu na čistenie rán.
- bráni priľnutiu sekundárneho krytia na spodinu rany.

Vzhľadom na použitie prírodných zložiek sa môžu jednotlivé šarže líšiť vo farbe (žltá – hnedá), viskozite a môžu obsahovať viditeľné kryštály cukru. Tieto odchýlky neovplyvnia účinnosť a použitie výrobku.

Indikácie

Povrchové a akútne rany, napr. rezné rany, odreniny a miesta transplantácie. Povrchové a čiastočne zhrubnuté popáleniny (1. a 2. stupňa). Chronické rany, ako sú preležaniny, bercové, arteriálne a diabetické vredy. Rozširujúce sa rany (na podporu dezodorizácie a/alebo vyčistenia). Kolonizované akútne rany a (pooperačné) chirurgické rany.

Kontraindikácie a obmedzenia

Dosiaľ nie sú známe žiadne kontraindikácie. Nepoužívajte u pacientov, o ktorý sú citliví na výrobek alebo na niektorú z jeho zložiek.

Preventívne opatrenia a pripomienky

1. Liečbu rany vždy konzultujte s lekárom.
2. Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo už bolo otvorené. Nepoužívajte po dátume expirácie.
3. Skontrolujte a očistite ranu podľa miestneho protokolu.
4. V dôsledku autolytického vyčistenia sa môže zdať, že rana sa po prvej výmene krytia zväčšila. To je normálne a vyskytuje sa pri odstránení devitalizovaného tkaniva, pri príprave spodiny rany na hojenie.
5. V prípade neznášanlivosti výrobku L-Mesitran alebo jednej z jeho zložiek odstráňte výrobok vhodnými technikami a oblasť starostlivo očistite.
6. L-Mesitran je určený na použitie u jedného pacienta. Výrobok sa môže opätovne použiť len u toho istého pacienta.
7. Výrobok po použití vždy znovu uzatvorte.
8. Po otvorení použite výrobok do troch mesiacov.
9. Výrobok zlikvidujte podľa miestneho protokolu.

Návod na použitie

A. Tuba: 1. Odstráňte vrchnák, vyčistite ústie tuby a vrchnú časť vrchnáka alkoholovým tampónom. 2. Zasuňte vrchnú časť vrchnáka do fóliového tesnenia, ktoré pokrýva špičku. Tubu teraz nestláčajte. B. Nádoba: odstráňte tesnenie a vrchnák. **Aplikácia na ranu:** 1. Pomocou sterilnej špachtličky naneste tenkú vrstvu výrobku L-Mesitran buď priamo na oblasť rany a okolité tkanivo alebo na sterilnú gázu. 2. Zakryte a zafixujte vhodným sekundárnym krytím v závislosti od množstva tekutiny vytekajúcej z rany. 3. Ranu a okolité tkanivá pravidelne kontrolujte podľa miestneho protokolu.

Frekvencia výmen

To závisí od množstva exsudátu a od potrieb rany. Výrobok aplikujte znova po jeho rozplynutí (\pm každých 24 – 48 hodín).

Opatrenia pri uchovávaní

Uchovávajúte pri izbovej teplote medzi 5°C a 25°C (41°F - 77°F). Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou. L-Mesitran je prírodný produkt a pri vyššej teplote premeniť na kvapalinu. Ak sa predpokladá, že to bude problém, pred použitím umiestnite výrobok do chladničky.

Posledná revízia textu: 28. 3. 2017

© Theo Manufacturing, BV, 2014

Výrobca: Triticum Exploitatie BV / Theo Manufacturing BV,
Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, Nizozemsko

www.l-mesitran.com www.leram-pharma.cz

Distribútor pre Slovensko:

LERAM pharmaceuticals SK s.r.o
Bajkalská 5/C, 831 04
Bratislava Nové-město
Slovenská republika

