

L-Mesitran Tulle

Opis výrobku

L-Mesitran Tulle je nepriľnavé polyetylénové krytie impregnované patentovaným géлом L-Mesitran Soft, ktoré obsahuje: 40 % lekárske med, lekárske hypoalergénny lanolín (Medilan®), propylénglykol, PEG 4000 a vitamíny C a E.

Keď je gél v kontakte s ranou, z okolitých tkanív sa odvádza tekutina. Vďaka tomu sa vytvorí vlhké prostredie na hojenie rany. Toto prostredie stimuluje proces hojenia rany: uľahčením autolýzy nekrotického a iného devitalizovaného materiálu, pomáha pri príprave spodiny rany a podporuje lepšiu migráciu epitelových buniek.

- L-Mesitran Tulle má antibakteriálne vlastnosti.
- Gél sa postupne stráca a dá sa ľahko odstrániť podľa miestneho protokolu na čistenie rán.
- L-Mesitran Tulle je primárne krytie na rany, ktoré sa majú pokryť bežne používanými sekundárnymi krytiami.
- Vlastnosti výrobku L-Mesitran Tulle bránia príľnutiu sekundárneho krytia na spodinu rany.
- V dôsledku použitia prírodných zložiek sa môžu jednotlivé šarže gélu farebne líšiť (biela - žltá - hnedá).
- Gél môže obsahovať viditeľné kryštály cukru; to však neovplyvní účinnosť a/alebo aplikáciu gélu.
- Biely polyetylénový film umožní, aby exsudáty prešli do sekundárneho krytia.

Indikácie

Povrchové a akútne rany, napr. rezné rany, odreniny a miesta transplantácie. Povrchové a čiastočne zhrubnuté popáleniny (1. a 2. stupňa). Chronické rany, ako sú preležaniny, bercové, arteriálne a diabetické vredy. Rozširujúce sa rany (na podporu dezodorizácie a/alebo vyčistenia). Kolonizované akútne rany a (pooperačné) chirurgické rany.

Kontraindikácie a obmedzenia

Dosiaľ nie sú známe žiadne kontraindikácie. Nepoužívajte u pacientov, o ktorých sú citliví na krytie alebo na niektorú z jeho zložiek.

Preventívne opatrenia a pripomienky

1. Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo už bolo otvorené. Nepoužívajte po dátume expirácie.
2. Ak sa považuje za nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na správne ošetrovanie rany, poraďte sa s lekárom.
3. Pred použitím skontrolujte a vyčistite ranu podľa miestneho protokolu.
4. V dôsledku autolytického vyčistenia sa môže zdať, že rana sa po prvej výmene krytia zväčšila. To je normálne a vyskytuje sa pri odstránení devitalizovaného tkaniva, pri príprave spodiny rany na hojenie.
5. Ak má pacient prejavy infekcie (horúčka, bolesť), alebo ak sa stav rany zhoršuje, vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Každé krytie L-Mesitran Tulle je určené len na jedno použitie. Použitý výrobok zlikvidujte podľa miestneho protokolu.

Návod na použitie

1. Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite ranu podľa protokolu.
2. Vyberte L-Mesitran Tulle z vrečka a podľa potreby ho prestrihnite na požadovanú veľkosť.
3. Krytie odlúpnite z obidvoch papierových podkladov a L-Mesitran Tulle priložte na ranu.
4. Zakryte a zafixujte vhodným sekundárnym krytím v závislosti od množstva tekutiny vytekajúcej z rany.
5. Ranu a okolité tkanivá pravidelne kontrolujte podľa miestneho protokolu.
6. V prípade neznášanlivosti krytia alebo jednej z jeho zložiek odstráňte krytie vhodnými technikami a oblasť starostlivo očistite.

Frekvencia výmen

L-Mesitran Tulle môže ostať na mieste niekoľko dní, v závislosti od množstva exsudátu a potrieb rany. Ak už gél nie je prítomný, L-Mesitran Tulle vymeňte. Ak je to vhodné, L-Mesitran Tulle je príliš suchý, úplné a jemné odstránenie výrobku L-Mesitran Tulle sa môže podporiť navlhčením.

Opatrenia pri uchovávaní

Uchovávajte pri izbovej teplote medzi 5°C a 25°C (41°F - 77°F). Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou. L-Mesitran je prírodný produkt a gél sa môže pri vyššej teplote premeniť na kvapalinu. Ak sa predpokladá, že to bude problém, krytie (bez vonkajšieho obalu) sa môže pred použitím umiestniť do chladničky.

Posledná revízia textu: 28. 3. 2017

© Theo Manufacturing, BV, 2014

Výrobca: Triticum Exploitatie BV / Theo Manufacturing BV,
Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, Nizozemsko

www.l-mesitran.com www.leram-pharma.cz

Distribútor pre Slovensko:

LERAM pharmaceuticals SK s.r.o
Bajkalská 5/C, 831 04
Bratislava-Nové mesto
Slovenská republika

