

### **Opis výrobku**

L-Mesitran Net je sterilné diafanózne sieťové krytie obalené hydroaktívnym hydrogélom obsahujúcim med. Používa sa na akútne a chronické rany. L-Mesitran Net obsahuje 20 % lekárskeho medu, akrylový polymérový gél a vodu na polyesterovej sieťovej štruktúre, ktorá umožňuje prechod exsudátu cez krytie. L-Mesitran Net sa má používať spolu s vhodným sekundárnym krytím a môže sa použiť spolu s výrobkami L-Mesitran Ointment a Soft. L-Mesitran Net je viacúčelová ochranná vrstva v kontakte s ranou, pričom hydrogélový povlak obsahujúci med zabezpečuje určitú mieru absorpcie a zadržiavanie exsudátu na udržanie vlhkého prostredia podporujúceho hojenie.

### **Indikácie**

Výrobok L-Mesitran Net je indikovaný na mierne až silno mokvajúce chronické rany, ako sú: preležaniny, povrchové a čiastočne zhrubnuté popáleniny, bercové, arteriálne a diabetické vredy a rozširujúce sa rany. Je indikovaný aj na akútne rany, ako sú miesta transplantácie, chirurgické rany, rezné rany a odreniny.

### **Kontraindikácie**

Nepoužívajte u jedincov so známou citlivosťou na krytie alebo jeho zložky. L-Mesitran Net sa nemá používať:

- Bez sekundárneho krytia na prevenciu vysychania krytia na rane a udržanie krytia na rane.
- Samostatne na silno mokvajúcich ranách.
- Na úplne zhrubnutých popáleninách, hlbokých, úzkych dutinách alebo sínusoch.

### **Upozornenia a opatrenia**

Krytie sa môže použiť na kontaminované a kolonizované rany. Ak sú však rany klinicky infikované, L-Mesitran Net sa má použiť len pod príslušným lekárskeym vedením. Akákoľvek ďalšia liečba infekcie sa má začať podľa miestneho protokolu a pod lekárskeym vedením. Na prevenciu vysychania krytia aplikovaného na dané miesto sa majú použiť vhodné sekundárne krytia. Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo nejakým spôsobom porušené.

### **Návod na použitie**

1. Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite ranu podľa protokolu.
2. Vyberte sterilné krytie z vrečka.
3. Krytie odlúpnite z čierneho plastového podkladu a odhalenú stranu priložte na ranu.
4. Zakryte a zaistite vhodným sekundárnym krytím.
5. Ranu a okolité tkanivá pravidelne kontrolujte podľa miestneho protokolu.
6. V prípade neznášanlivosti krytia alebo jednej z jeho zložiek odstráňte krytie vhodnými technikami a oblasť starostlivo očistite.

### **Frekvencia výmen**

Krytie môže ostať na mieste až päť dní, v závislosti od množstva exsudátu vytekajúceho z rany a potrieb rany. Ak je to vhodné, L-Mesitran Net môže ostať na mieste počas výmeny sekundárneho krytia. Ak by krytie príliš vyschlo, úplné a jemné odstránenie krytia možno podporiť navlhčením. Každé krytie je určené len na jedno použitie. Nepoužívajte po dátume expirácie. Uchovávajte pri teplote medzi 5 °C a 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou.